

ACTIVESHOP[®]

Návod k použití

Vapozon Sonia H1107



Dovozce:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.
ul. Graniczna 8b, budowa
DC2A 54-610 Wrocław,
Polsko

www.activeshop.com.pl

Rev A/04/2025



POPIS ZAŘÍZENÍ

Vapozon AZZURRO H110V SONIA má nový vylepšený design, základnu z nerezové oceli, vestavěnou UV lampu a pevně připevněnou nádobu na vodu s těsnícím kroužkem, který zabraňuje úniku vody a plynu. Rameno stříkací trysky má speciální konstrukci pro široké spektrum použití a hlavice se může otáčet dopředu a dozadu pod úhlem 110°.

2) PRINCIP FUNGOVÁNÍ (ÚČINKY)

1. Změkčuje odumřelé buňky na povrchu pleti a připravuje ji tak na další čisticí proceduru.
2. Otevírá póry a připravuje tak pleť na hloubkové čištění.
3. Proniká do pórů, čímž usnadňuje odstranění černých teček, nahromaděných nečistot a zbytků z předchozích ošetření a zvyšuje účinnost dalšího čištění.
4. Pomáhá pokožce zbavit se škodlivých látek (toxinů).
5. Dočasně vyhlazuje vrásky.
6. Zrychluje krevní oběh, hydratuje buňky, urychluje buněčný metabolismus a příznivě ovlivňuje autoregeneraci.
7. Současně se zapojením aromaterapie dochází ke stimulaci nervových zakončení a celkovému zlepšení stavu pokožky.

3) TECHNICKÉ ÚDAJE


Název produktu	WAPOZON AZZURRO
Model	H110V SONIA
Akce	Obličejový vapozon
Jmenovité napětí / výkon	AC 110-130 V / 70 W / AC 220-240 V / 80 W
Provozní frekvence	50 / 60 HZ
Rozměry	1100 X 340 X 280 mm
Čistá hmotnost	5,2 kg

4) OBSAH BALENÍ

Prvek	Kreslení	Množství
Hlavní jednotka		1 sada
Stojan		1 kus
Pět nohou stojanu		5 kusů
Základna s pěti větvemi		1 kus
Deska s pěti otvory pro nohy		1 kus
Šroub M10		1 sada
Klíč		1 kus
Pouzdro		1 kus
Bavlněný filtr na esence		2 kusy
Návod k obsluze		1 kus

o) POPIS VAPOZONU (OBRÁZEK 1)

1. Součásti ramene;
2. Hlavní jednotka (základna);
3. Stojan (sloupec).

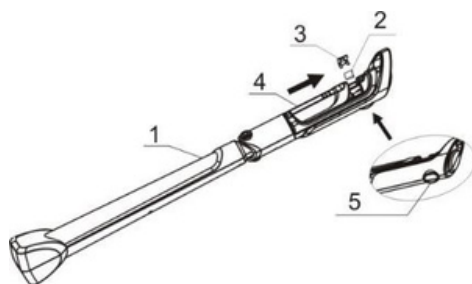

(OBRÁZEK 2)

1) POPIS DÝZA ROZPRAŠOVACÍ TRYSKA


1. Rameno stříkací trysky;
2. Bavlněný filtr na esence;
3. Zabezpečení (podstata);
4. Posuvné víko;
5. Výstup páry.

Obrázek 1

(OBRÁZEK 2)

2) POPIS ZAŘÍZENÍ MAIN


1. Víko od odpařovače;
2. Ovládací panel;
3. Rozprašovací komora;
4. Nádobka na vodu;
5. Topné potrubí;
6. Přepínač;
7. Pojistka;
8. Napájecí kabel.

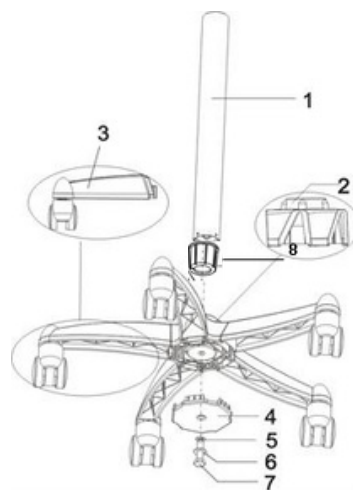

Obrázek 4

3) POPIS STOJANU (OBRÁZEK 4)


1. Stojan (sloupec);
2. Základna s pěti větvemi;
3. Stojná noha;
4. Deska s pěti otvory pro nohy;
5. Jaro $\Phi 10$;
6. Podložka $\Phi 10$;
7. Šroub $M10$;
8. Pouzdro.

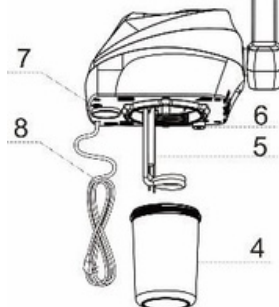

Obrázek 5

4) ZPŮSOB INSTALACE (OBRÁZEK 6)


Krok 1: Umístěte pět nohou stojanu do základny s pěti větvemi. Krok 2: Poté umístěte stojan (sloupek) připojený k pouzdru do základny desky. Krok 3: Nasadte nožičky do příslušných otvorů v desce. Do šroubu $M10$ vložte podložku $\Phi 10$ a pružinu $\Phi 10$. Poté desku s pěti namontovanými nožičkami připojte a připevněte ke stojanu pomocí šroubů $M10$. Krok 4: Umístěte hlavní jednotku na stojan.

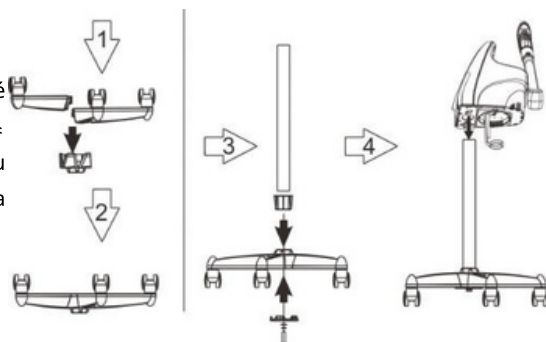

Obrázek 6

POPIS OVLÁDACÍHO PANELU OBRÁZEK 1

1. Přepínač zapnutí/vypnutí ozónu;
2. Indikátor provozu horké páry;
3. Časovač.

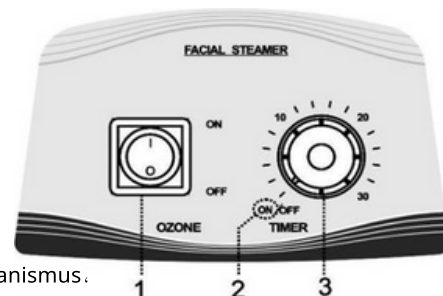

Obrázek 1

1.1 INSTRUKCE

1. Uvolnění zámkové ustríhací ramene:

Po vyjmutí z obalu je rameno uzamčeno. Chcete-li uvolnit blokovací mechanismus, zatáhněte jednou rukou za konec směrem k černé šipce (jak je znázorněno na obrázku 2) a druhou rukou

otočte.

hrot do vodorovné polohy. Jakmile hrot uvolníte, odemkne se. Před zapnutím přístroje se ujistěte, že

- 2.

rameno odblokováno (mělo by být nakloněno pod úhlem přibližně 130°).

Nastavení stříkací hlavy a trysky:

Díky speciální konstrukci lze rameno postřikovače přizpůsobit různým potřebám a umístit jej

lze je otáčet o 130° dopředu a

pod

doleva.

různými úhly (obrázek 3):

Lze je otáčet dopředu a dozadu o

360°. Ramenem se smí manévrovat pouze ve stanovených mezích. V opačném případě, pokud je nastaveno mimo přípustný rozsah, může


tryskačka vést k poškození součástí nebo zařízení. Nastavení ramene mimo rozsah vede ke ztrátě záruky.

Neumísťujte rameno příliš pevně, aby nedošlo k poškození konektorů a jejich součástí.


o.

ξ

ξ

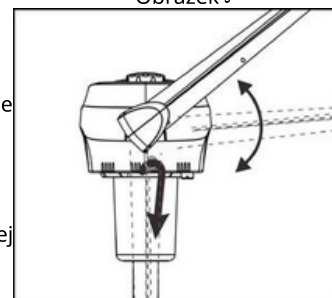


Obrázek 2

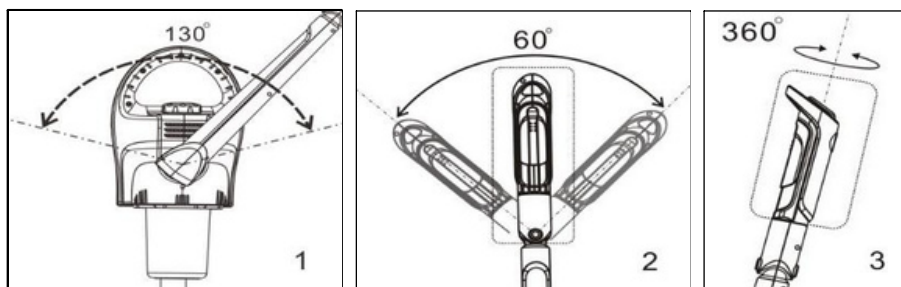

Obrázek 3

3. Doplnění vody:


Otevřete víko a nalijte do nádoby vodu. Hladina vody by měla být mezi vyznačenou spodní a horní čarou nádoby (viz obrázek 4).

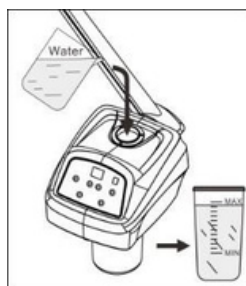

Obrázek 4

Umístění a vyjmutí nádoby na vodu:

Před odšroubováním odpojte přístroj od zdroje napájení a nechte nádobu vychladnout. Uchopte nádobu jednou rukou a vyšroubujte ji ve směru hodinových ručiček, zatímco druhou rukou držíte dno nádoby, tak při nasazování nádoby na vodu nezapomeňte přístroj odpojit od zdroje napájení. Uchopte nádobu jednou rukou a odšroubujte ji proti směru hodinových ručiček, druhou rukou přidržíte dno nádoby (viz obrázek 11).

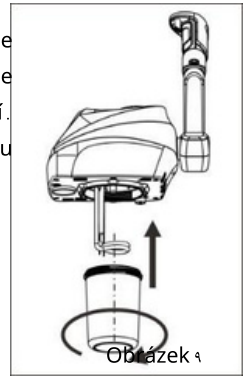

12) POPIS OVLÁDÁNÍ OVLÁDACÍHO PANELU

1. Připojte zařízení ke zdroji napájení.
2. Nastavte časovač (TIMER) ve směru hodinových ručiček, nastavte ukazatel na správnou hodnotu.
 - a Během provozu se rozsvítí kontrolka (indikátor) časovače.
 -) Po zapnutí se topná trubice začne zahřívat.
 - b Přibližně po 1 minutách se z výstupu uvolní pára. V případě potřeby lze poté aktivovat funkci ozonizace.
 -)
3. Aktivace funkce ozónu:
 - a Stiskněte přepínač tlačítka 'OZONE'.
 -) Rozsvítí se kontrolka tlačítka 'OZONE'.
 -) Funkce ozónu se spustí po stisknutí spínače (tlačítka).
 - b Díky procesu rozprašování je ve vzduchu cítit charakteristický zápach ozonu.
 -)
4. Během chodu spotřebiče se bude uvolňovat pára a hladina vody bude postupně klesat. Nastavte 'TIMER' do polohy 'OFF' a vypněte d napájení.

13) POZNÁMKY

1. Před zapnutím můžete spotřebič sejmout, když hladina vody v nádobě klesne pod úroveň nasazení. Hladina vody je přiměřená a mezi horní a dolní ryskou.
2. Rovněž je víko odpařovače správně nasazeno na nádobu na vodu.
3. Počkejte, až se pára začne rovnoměrně uvolňovat z výstupu, a teprve poté začněte ošetřovat. Mezi tryskou a obličejem ošetřované osoby udržujte vzdálenost nejméně 10 cm. Pára by se měla rovnoměrně šířit po celém obličejí počínaje
4. bradou, aby nedošlo k popálení obličeje horkou párou.
5. Ozon má sterilizační účinek, ale může také poškodit pokožku a zničit živiny obsažené v bylinách, proto je důležité nastavit správnou dobu podle
6. typu pokožky ošetřované osoby.
7. Nepoužívejte nadměrnou sílu ani nenastavujte ostříkovačí rameno nad povolený rozsah, aby nedošlo k poškození konstrukce ramene.
8. Nádobu na vodu neodstraňujte ihned po skončení sprchování, protože je velmi horká a může způsobit popáleniny. Počkejte, až nádoba vychladne, a teprve poté ji vyjměte.
9. Nesmí se nalít příliš mnoho vody, protože to má nepříznivý vliv na provoz hlavní jednotky a může způsobit elektrický zkrat.
10. Pokud dojde k úmyslnému nebo neúmyslnému úniku vody nebo plynu (ozónu) pod spotřebičem nebo kolem víka odpařovače, okamžitě odpojte

14) VAROVÁNÍ

1. Spotřebič od napájení. Zkontrolujte, zda je nádoba na vodu nebo víko odpařovače správně nasazeno. Pokud to není, připevněte je přímo do nádoby na vodu nebo do sítky na bylinky, protože by to mohlo mít nepříznivý vliv na funkci rozprašování.
2. Nepoužívejte vodu z vodovodu nebo voda nevyhovující kvality. Doporučuje se používat pouze přečištěnou, destilovanou nebo filtrovanou vodu, jinak mohou nastat problémy.
3. Nepokládejte se nad výstup páry, nedotýkejte výstup páry v blízkosti obličeje, mohl by dojít k popálení.
4. Neodstraňujte víko nebo nádobu na vodu, pokud je spotřebič v provozu.
5. Spotřebič se nesmí používat v příliš vlhkých místnostech, např. v koupelnách apod.
6. Nepoužívejte spotřebič na místě se silným slunečním zářením, mohl by to vést k nestandardnímu spotřebiči.
7. V případě problémů se obraťte na prodejce nebo autorizované servisní středisko. Přístroj neopravujte sami.

- Λ. Pokud dojde k poškození napájecího kabelu a dalších součástí nebo příslušenství spotřebiče, je nutné je okamžitě vyměnit. Se spotřebičem smí používat pouze originální díly. Veškeré výměny nebo opravy smí provádět pouze autorizované servisní středisko.

10) ÚDRŽBA SPOTŘEBIČE

- a) Každý den před zapnutím spotřebiče nalijte do nádoby čerstvou, čistou vodu. Do nádoby na vodu vždy používejte kvalitní vodu. Po použití nádoby důkladně umyjte, aby se v ní nehromadila mastnota nebo jiné nečistoty.
- b) Jednou týdně by se měl topný systém vyčistit a odvápnit. K čištění nádoby na vodu lze použít roztok octa a, který se před čištěním topné trubky zahřívá asi 1 minutu. Pravidelně kontrolujte hladinu vody v nádobě.
- c) Po každém použití přístroj vyčistěte, aby se na něm nehromadily zbytky po ošetření.

11) KONTAKTNÍ ÚDAJE

Pokud se obdržené zařízení liší od zařízení uvedeného v této příručce, obraťte se na svého prodejce nebo dovozce. Výrobce spotřebiče si vyhrazuje právo, že informace obsažené tímto návodem mohou být změněny bez předchozího upozornění uživatelů.

POZNÁMKA!!!

Do nádržky na vodu nenalévejte esenciální oleje ani žádnou jinou tekutinu než vodu. Může to vést k poškození spotřebiče nebo k fyzickému zranění.

POZNÁMKA!!!

Nedotýkejte se nádržky na vodu, když je spotřebič zapnutý.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

1. Přístroje je profesionální zařízení pro použití v kosmetických ordinacích. Obsluha přístroje pouze kvalifikovaným kosmetickým personálem zabraňuje nežádoucím účinkům během ošetření.

2. Zařízení se nesmí rozebírat ani se pokoušet používat k jiným účelům, než je uvedeno v tomto návodu. Veškerý servis a opravy smí provádět pouze autorizovaný servisní technik (společnost ACTIVESHOP Sp. z o.o.).

3. Přístroj neinstalujte nepoužívejte v blízkosti kapalin, na mokřích místech nebo s mokřima rukama - aby se do přístroje nedostaly žádné kapaliny.

4. V následujících případech okamžitě vytáhněte zástrčku ze zásuvky a obraťte se na autorizovaný servis společnosti ACTIVESHOP s.r.o.:

- a) do spotřebiče vnikla kapalina, b) spotřebič vydává zvláštní zápach, kouř nebo vydává zvláštní zvuky, c) došlo k poškození napájecího kabelu, d) spotřebič byl převrácen nebo byl poškozen jeho kryt.

5. Nepokládejte na kabely žádné předměty. Neinstalujte jednotku na místa, kde by někdo mohl šlápnout na napájecí kabel.

6. Z bezpečnostních důvodů odpojte napájecí kabel ze zásuvky vždy, když s přístrojem skončíte.

7. Do otvoru spotřebiče nic nevkládejte. Pokud se do otvoru dostane cizí předmět, vyjměte kabel ze zásuvky a kontaktujte distributora nebo výrobce.

8. Přístroj nestavte na nestabilní vozík, polici nebo vozidlo. V případě pádu může dojít k poškození přístroje.

poškození.

9. Aby byla zaručena pevná životnost zařízení, doporučuje se před dalším stisknutím tlačítka napájení (mezi zapnutím a vypnutím a naopak) dodržet interval jedné minuty.

10. Napájecí zdroj musí odpovídat specifikacím uvedeným na typovém štítku. V opačném případě hrozí nebezpečí poruchy, poškození nebo dokonce vyhoření spotřebiče.

POZNÁMKY:

1. V případě poškození napájecího kabelu nebo jiných poruch se obraťte na autorizované servisní středisko - předejdete tak nebezpečí.

2. Toto zařízení mohou používat děti ve věku nejméně 8 let a osoby se sníženými fyzickými a duševními schopnostmi a s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi zařízení, pokud je zajištěn dohled nebo instruktáž, jak zařízení bezpečně používat, aby byla pochopena související rizika.

3. Spotřebič není určen k tomu, aby si s ním hrály děti. Nedovolte dětem, aby si se spotřebičem hrály.

4. Nenechávejte spotřebič bez dozoru, pokud se v jeho blízkosti nacházejí děti nebo osoby bez dostatečných znalostí o používání spotřebiče.

5. Tento elektrický spotřebič není hračka. Nesprávné použití nebo kontakt s elektrickým spotřebičem může ohrozit zdraví nebo vést k úmrtí, proto by měl být spotřebič používán a skladován mimo dosah dětí.



LIKVIDACE SPOTŘEBIČE

Použité elektrické spotřebiče, příslušenství a obaly odevzdejte do recyklačních středisek v souladu s předpisy na ochranu životního prostředí. Elektrické spotřebiče by neměly být vyhazovány do popelnice na domovní odpad. Dodržujte pravidla pro likvidaci tohoto typu zařízení. V zájmu ochrany životního prostředí v souladu se směrnicí 2012/19/ES o odpadních elektrických a elektronických zařízeních je nutné použítá elektrozařízení sbírat odděleně a odevzdávat je na sběrných místech pro odpadní elektronická a elektrická zařízení.

Vyřazené a staré spotřebiče obsahují plně recyklovatelné součásti, a proto by měly být odevzdány k recyklaci. Proto by měly být odevzdávány na příslušných sběrných místech a lze je odevzdat také společnosti ACTIVESHOP s.r.o.

SKLADOVÁNÍ A PŘEPRAVA

Přístroj by měl být přepravován při teplotě od (-) 20 °C do (+) 50 °C pouze v původním obalu. Přístroj skladujte v dobře větraném prostoru s relativní vlhkostí nejvýše 75 %. Provozní teplota (+) 10 °C až (+) 40 °C. Během skladovacích a přepravních procesů nesmí být přístroj hozen nebo upuštěn, vystaven mechanickým nárazům nebo atmosférickým vlivům.