

ACTIVESHOP[®]


NÁVOD K POUŽITÍ

VODÍK H₂+ 6V1



Dovozce:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.
ul. Graniczna 8b, bud DC 2A
54-610 Wrocław, Polsko
www.activeshop.com.pl
Rev. A/04/2024

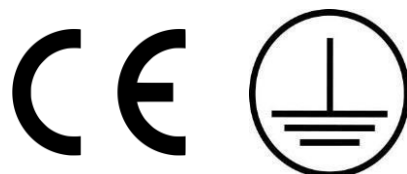

Přístroj Hydrogen H2+ je inovativní přístroj na obličej, který umožňuje několik ošetření pro péči o pleť, čištění a omlazení. Tento přístroj kombinuje až 6 prvků plnicích různé funkce.

Technické údaje:

Napětí	220-240V 50Hz
Power	160W
Frekvence ultrazvuku	1Mhz
Rozměry	46x30x43,5 cm

Funkce zařízení:

RÁDIOVÉ VLNY (RF) - Hlavice vysílající rádiové vlny vytváří teplo, které proniká do kůže a hlubokých vrstev pokožky. Tím se zahřívají kolagenová vlákna, která se smršťují, což má za následek zpevnění pleti a obnovení její struktury. Toto ošetření zlepšuje ovál obličeje, redukuje vrásky a vypíná pokožku.

ULTRADISCATION - Ultrazvuková hlavice umožňuje vstřikování účinných látek hluboko do pokožky. Okysličuje pokožku, takže pleť vypadá mladší a zářivější.

ČIŠTĚNÍ VODÍKEM (HYDRABRAZION) - Při tomto ošetření dochází k čištění pokožky a odstraňování odumřelé kůže. Výsledkem ošetření je hladká, hloubkově hydratovaná a zářivá pleť.

CHLADIVÁ HLAVA - Masáž prováděná touto hlavou je určena ke zklidnění podrážděné pokožky po ošetření a ke stažení cév a snížení případného zarudnutí.

OXYGEN SPRAY - Hlavice "SPRAY" umožňuje aplikaci hydrolátu nebo speciální ampule, např. hydratační, regenerační nebo okysličující. Ošetření touto hlavicí má na pokožku zklidňující a zpevňující účinek.

KAVITACNÍ PEELING - Jedná se o bezbolestný způsob čištění odumřelých buněk ze zrohovatělé vrstvy kůže. Zlepšuje tón pleti a snižuje počet černých teček.

Bezpečnostní opatření:

- 1) Nepoužívejte zařízení, které je připojeno k několika zdrojům napájení;
- 2) Při výměně pojistky vypněte tlačítko napájení, aby nedošlo k požáru nebo úrazu elektrickým proudem;
- 3) Použijte napájecí zdroj 220 V $\pm$ 22 V, 50 HZ $\pm$ 1 HZ a zemnicí zásuvku.
- 4) Použití poškozené stránky kabel přívodní kabel rizika požár nebo úrazu elektrickým proudem úraz elektrickým proudem;
- 5) Napájecí kabel nepřekrčujte ani nepřekrčujte, aby nedošlo k požáru nebo úrazu elektrickým proudem;
- 6) Pokud je jednotka poškozená, obraťte se na servisní oddělení;
- 7) Zařízení nepoužívejte na nestabilním podkladu/prostředí, jako je sklon, vibrace, nárazy;
- 8) V jednotce nesmí být voda ani nečistoty, v případě výskytu cizích těles kontaktujte společnost;
- 9) Při přenášení přístroje odpojte zástrčku od napájení;
- 10) Se zapnutým přístrojem nehýbejte;
- 11) Jednotka by měla být umístěna na stabilním p o v r c h u , přičemž by mělo být ponecháno alespoň 5 cm volného prostoru pro zajištění cirkulace vzduchu;
- 12) Jednotka nesmí být ničím zakryta, aby nedošlo k zablokování větracích otvorů;
- 13) Zařízení nepoužívejte v následujících podmínkách: sluneční světlo, vysoká vlhkost, blízkost vody, vibrace, šikmý povrch; prostředí se silným magnetickým polem;
- 14) Přístroj nesmí být umístěn v blízkosti rádií, televizorů, kopírek, faxů apod;
- 15) Nelze používat společně s jinými zařízeními (např. mikrovlnnými troubami), aby nedocházelo k vzájemnému rušení, které by způsobovalo poruchy.
- 16) Před zapnutím stroje si pečlivě přečtěte návod k obsluze. Uživatel musí být s návodem k obsluze seznámen.
- 17) Zkontrolujte, zda jsou všechny kabely bezpečně připojeny.

18) Pracovní parametry přístroje, čas a intenzitu je třeba volit individuálně podle potřeb klienta a jeho pokožky.

Pozor:

- Po ošetření je třeba všechny násadce důkladně vyčistit a vydezinfikovat v souladu s platnými bezpečnostními normami. Hlavičky, které jsou přímo připojeny k přístroji, nenamáčejte. Mohlo by dojít k poškození přístroje. Čisté hlavičky by měly být umístěny na stojanu, který je připojen k zařízení.
- Spotřebič by se měl čistit hadříkem, nesmí se používat silné chemické přípravky. Pokud se spotřebič delší dobu nepoužívá, je třeba jej dobře vyčistit a vylít veškerou zbývající vodu.

Čištění zařízení:

- Po postupu čištění vodíkem je třeba hlavy vyčistit. Do nádrže C nalijte filtrovanou vodu a hlavičky vyčistěte.
- Vnější stranu přístroje otřete vlhkým hadříkem a poté ji otřete do sucha.

Kontraindikace léčby:

1. Citlivá pleť, velmi silné akné.
2. Kardiostimulátor, implantabilní srdeční defibrilátor nebo jiné implantabilní elektromagnetické zařízení.
3. Těžká cukrovka, vysoký krevní tlak a vysoká hladina cholesterolu.
4. Bakteriální, virová a plísňová kožní onemocnění.
5. névy, hemangiomy, jizvy a čerstvé rány na kůži.

Indikace:

1. kožní problémy, jako je akné, černé tečky, cévnatá pleť nebo zvýšená tvorba kožního mazu.
2. Hlubkové čištění pleti.
3. Vyhlazení jizev a stop po akné.
4. Vyhlazení vrásek.
5. Suchá pleť, která potřebuje hydrataci.

Skladování: Přístroj by měl být skladován v dobře větrané, čisté místnosti při okolní teplotě 5 °C až 40 °C a relativní vlhkosti vzduchu nepřesahující 80 %.

Konstrukce zařízení:



1. Nádrž na čistou a odpadní vodu
2. Napájecí zásuvka
3. Vstupy pro připojení hlavic (umístěné na obou stranách jednotky)
4. Dotykový displej
5. Regulátor vodního paprsku
6. Knoflík pro výběr válce (ABCD)
7. Otočný knoflík pro nastavení podtlaku
8. Tlačítko pro vyjmutí láhve ABC (pro vyjmutí láhve stiskněte tlačítko a stáhněte láhev dolů)
9. Lahve ABC - pro účinné látky

Hlavy



1.

2.

3.

4.

5.

6.

1. Chladicí hlava

2. Radiofrekvenční hlavice

3. Hlava "SPRAY"


Hydrobrazivní hlava (hydrogenační úprava)

Ultrazvuková hlavice

Hlava pro kavitační peeling

Sada obsahuje: 6 léčebných hlavic, 6 nastavců pro vodíkovou čisticí hlavici, 2 nastavce pro hlavici "SPRAY", 3 lahvičky na účinné látky (A B C), lahvičku na čistou a odpadní vodu, napájecí kabel a stojan na hlavu.

Zobrazení:

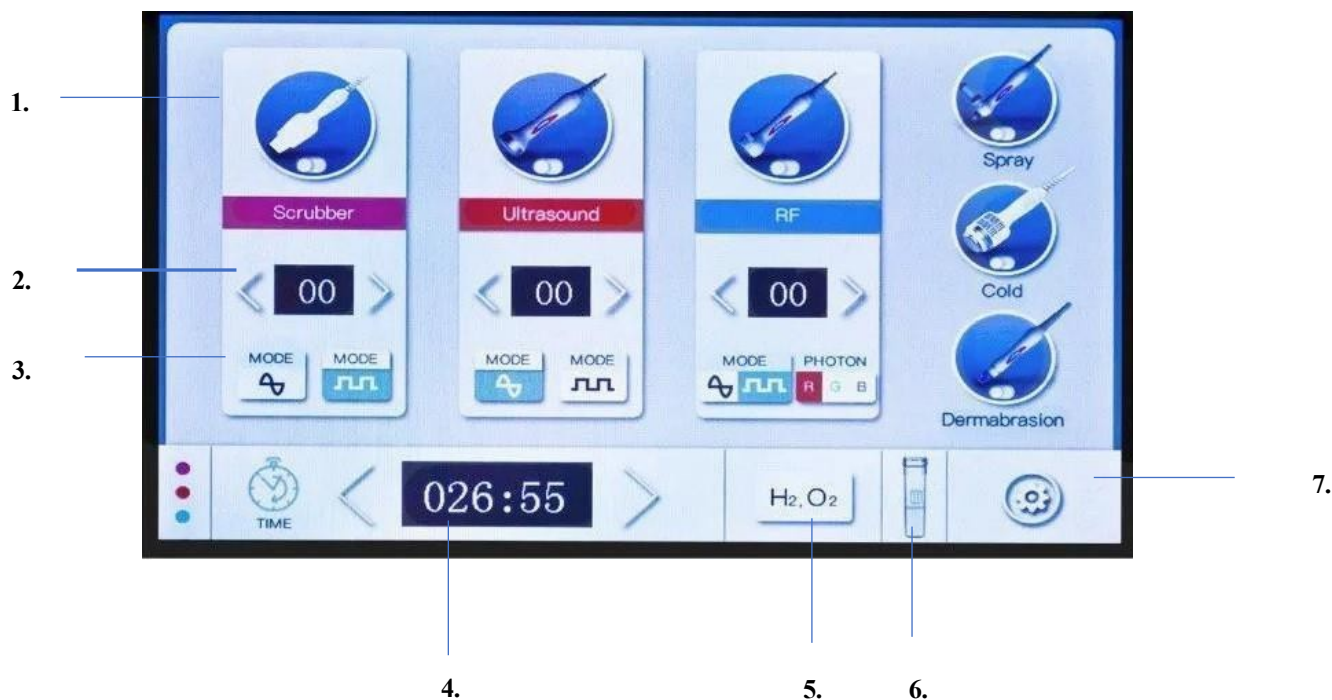

1. Volba hlavy
2. Výběr intenzity
3. Výběr režimu léčebné vlny
4. Délka léčby
5. Začátek zavlažování
6. Množství spotřebované vody
7. Menu (výběr jazyka)


NÁVOD K POUŽITÍ:

1. Před ošetřením pleť důkladně umyjte a vyčistěte a odstraňte zbytky make-upu.
2. Naplňte nádrž na čistou vodu a lahve ABC vodou pro účinné látky (roztokem přizpůsobeným prováděnému ošetření).
3. Připojte hlavy k zařízení.
4. Připojte jednotku ke zdroji napájení a poté stiskněte spínač na boku jednotky.
5. Obrazovka se zapne.
6. Pomocí šipek "< >" upravte dobu ošetření. ">" prodlouží dobu ošetření a "<" ji zkrátí.
7. Poté upravte intenzitu ošetření, rovněž pomocí šipek "< >" (umístěných pod ikonami hlav), a to pro každou hlavu zvlášť.
8. Zvolte příslušný režim hlavy.
9. Poté klikněte na ikonu hlavy, kterou chcete použít, a začněte pracovat.

Podpěra hlavy:

1. Hlava "SPRAY"

Ošetření fyziologickým roztokem slouží k čištění pleti, zatímco v kombinaci s vhodnou ampulí má hydratační, okysličující nebo regenerační účinek.

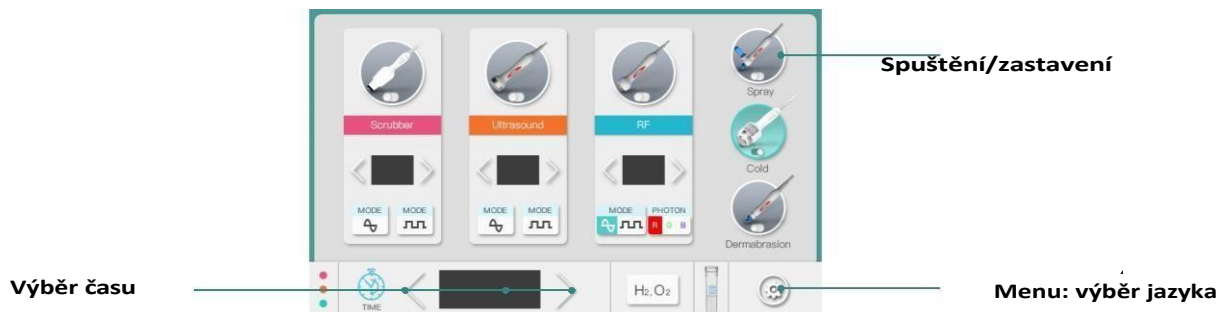


1. Zapněte zařízení.
2. Nalijte příslušný přípravek do lahvičky* umístěné u hlavice "SPRAY".
3. Zvolte čas ošetření.
4. Klikněte na ikonu hlavy SPRAY, namiřte hlavu na obličej a spusťte ošetření.
5. Po uplynutí nastavené doby ošetření skončí.

*Lahvička pro hlavu "SPRAY" je součástí sady. Po každém ošetření je třeba lahvičku vydezinfikovat, polít čistou / filtrovanou vodou a hlavici vyčistit podle výše uvedeného schématu.


2. Chladicí hlava

Je určen ke zklidnění podrážděné pokožky po kosmetických zákrocích.

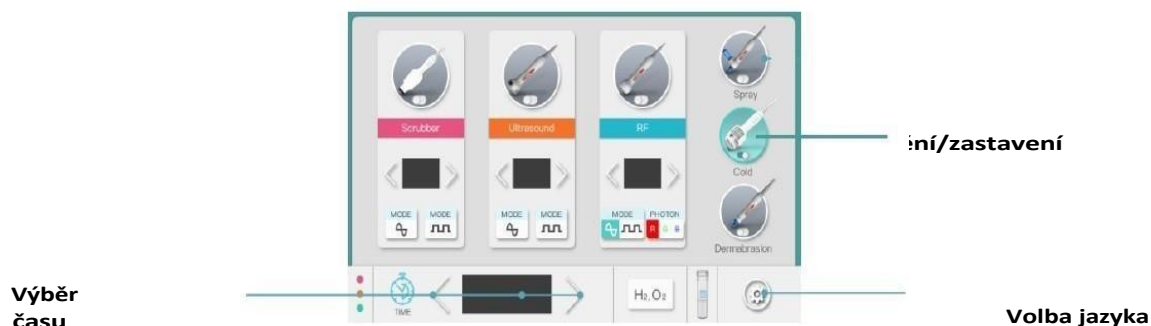

1. Zapněte zařízení.
2. Zvolte vhodnou dobu ošetření.
3. Klikněte na ikonu chladicí hlavice a spusťte ošetření - před zahájením ošetření lze na pokožku aplikovat ampuli nebo hydrolát, který pomůže hlavici vést po pokožce.


3. Kavitační peelingová hlava - jedná se o způsob čištění odumřelých buněk rohové vrstvy kůže.

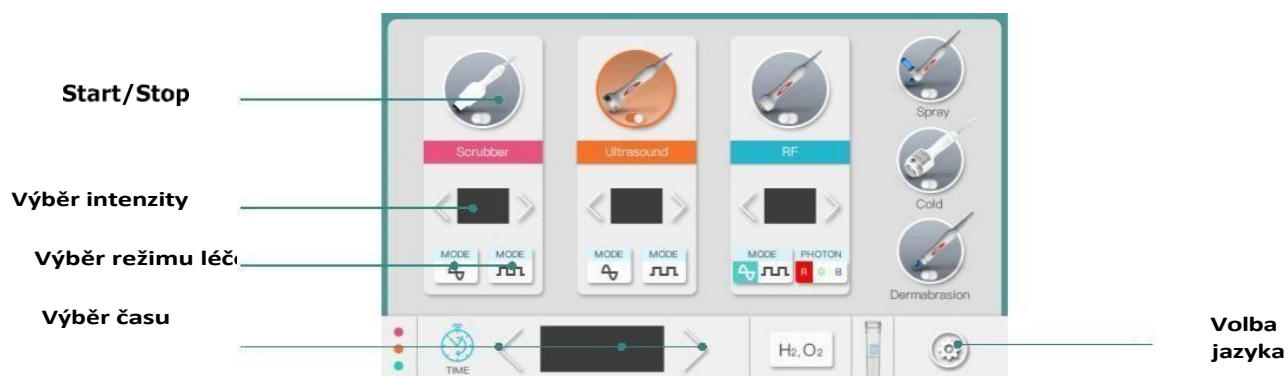


1. Zapněte zařízení.
2. Zvolte příslušný režim léčebné vlny.
3. Zvolte správnou intenzitu léčby.
4. Zvolte čas ošetření.
5. Před ošetřením si obličej důkladně umyjte a očistěte. Na očištěnou pleť naneste malé množství vody. Obličej můžete lehce navlhčit vatovým tamponem namočeným v jemném toniku. Pokožka by měla zůstat vlhká po celou dobu kavitačního ošetření.
6. Klikněte na ikonu kavitační peelingové hlavice a spusťte ošetření. Držte špachtli pod úhlem 45° (obr. 1). Přejeďte špachtlí po obličeji, např. zprava doleva nebo zdola nahoru.

Sonoforéza (ultrazvuková masáž) - před zahájením léčby aplikujte příslušnou ampuli a ultrazvukový gel. Špachtli držte na obou stranách hlavy a lehce ji přitlačte na kůži (obr. 2). Cílem ošetření je zavést účinné látky do hlubších vrstev epidermis.

1.

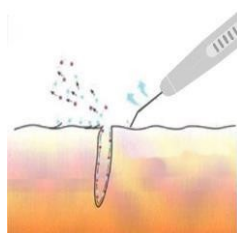


2.

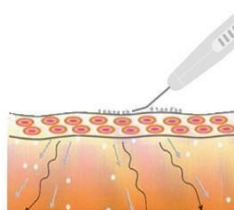

4. Radiofrekvenční (RF) hlavice


Hlavice vyzařující rádiové vlny vytváří teplo, které proniká do kůže a podkoží v pokožce. Tím se zahřívají kolagenová vlákna, která se smršťují, což má za následek zpevnění pleti a obnovení její struktury. Toto ošetření zlepšuje ovál obličeje, redukuje vrásky a vypíná pokožku.

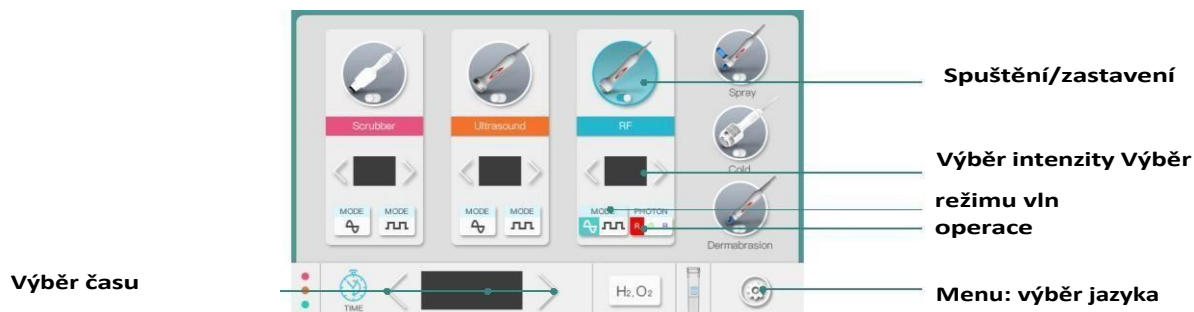

1. Zapněte zařízení.
2. Zvolte příslušný režim léčebné vlny.
3. Zvolte správnou intenzitu léčby přizpůsobenou klientovi.
4. Zvolte čas ošetření.
5. Na očištěnou pokožku naneste radiofrekvenční gel.
6. Klikněte na ikonu radiofrekvenční hlavice a spusťte ošetření.
7. Hlavou provádějte klouzavé nebo krouživé pohyby.


5. Ultrazvuková hlava

Zavádí účinné látky obsažené v kosmetice hluboko do pokožky.

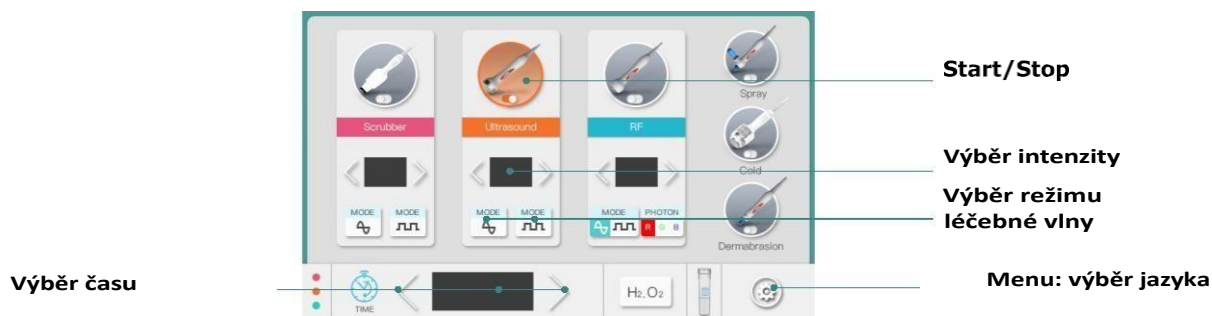

1. Zapněte zařízení.
2. Zvolte příslušný režim léčebné vlny.
3. Zvolte správnou intenzitu léčby.
4. Zvolte čas ošetření.
5. Na vyčištěnou pleť naneste ultrazvukový gel.
6. Klikněte na ikonu ultrazvukové hlavice a spusťte ošetření.
7. Pomalými krouživými pohyby je provádějte asi 5-8 minut.

6. Hydrabráže - nejnovější technologie exfoliace odumřelé kůže pomocí speciální hlavice. Výsledkem ošetření je vyčištěná, hladká, hluboce hydratovaná a zářivá pleť.

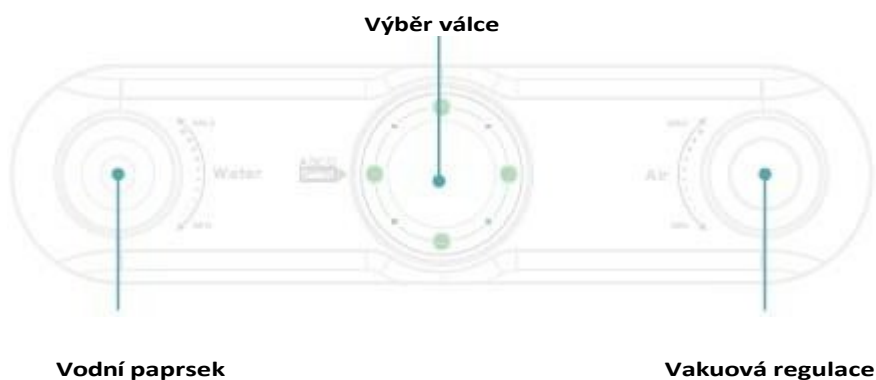

1. Zapněte zařízení.
2. Pomocí voliče zvolte správný válec potřebný pro ošetření.

Pokud je vybrána láhev D (H₂O₂), stiskněte tlačítko H₂O₂ (umístěné na obrazovce).

3. Pomocí knoflíku pro nastavení průtoku vody a podtlaku nastavte požadovaný průtok vody a úroveň podtlaku.
4. Zvolte čas ošetření.
5. Klikněte na ikonu hydrabráže a spusťte ošetření.

Válce na přední straně jednotky:



Válce A a B se používají pro aplikaci vodných roztoků s vhodným ošetřujícím přípravkem.

Po každém ošetření je třeba do C-lahve nalít čistou/filtrovanou vodu, aby se vyčistily zkumavky a jednotka použitého ošetřovacího přípravku. Pokud se jednotka pravidelně nečistí, může to vést k ucpání trubiček a znehodnocení zařízení.

Nalijte vodu do lahve D, nasadte trysku na čištění vodíku na hlavu*. Nastavte proud vody na maximum a sílu podtlaku na střední a zapněte přístroj. Doba trvání je přibližně 7-10 min.

* součástí sady jsou hlavy na čištění vodíku.

Láhev na použitou vodu a láhev D (H₂O₂) jsou umístěny v zadní části přístroje:



Do válce D (H₂O₂) se nalije čistěná/filtrovaná voda. Ve válci D probíhá hydrogenace. Láhev D a láhev s odpadní vodou musí být dobře utaženy, jinak přístroj nebude správně fungovat. Hlídejte hladinu použité vody, aby nedošlo k jejímu přetečení a znehodnocení přístroje.

Chcete-li válec demontovat, jednoduše jej odšroubujte a vyjměte, chcete-li jej nainstalovat, musíte jej utáhnout.

POZOR!

Před prvním použitím připojte přístroj podle výše uvedených pokynů a poté jej doplňte vhodnou lahví s vodou nebo pečujícím přípravkem. Nasadte trysku na čištění vodíku na hlavici na čištění vodíku. Otočte spotřebu vody na max. a silou

vyberte ikonu hlavy pro čištění vodíku a zapněte jednotku. Čas 7-10 min.

Údržba

Před použitím zkontrolujte jednotku a montážní součásti. Pokud jsou elektrické kabely deformované, přetržené nebo odpojené, vyměňte je za nové.


Po každém ošetření přístroj důkladně vyčistěte a hlavy vydezinfikujte. Pokud chcete přístroj vyčistit zvenčí, nejprve jej odpojte od sítě. Otřete jej vlhkým hadříkem a poté jej otřete do sucha.

Výměna pojistek

Specifikace elektrické pojistky 8A ($\Phi 5 \times 20\text{mm}$)

Při výměně pojistky proveďte následující kroky:

- 1) Vypněte zařízení tlačítkem 0/I;
- 2) Odpojte napájecí zástrčku;
- 3) Šroubovákem otevřete kryt pojistky.
- 4) Vyjměte vadnou pojistku a vyměňte ji za novou.
- 5) Vložte pojistku zpět do původní polohy;
- 6) Připojte zástrčku;

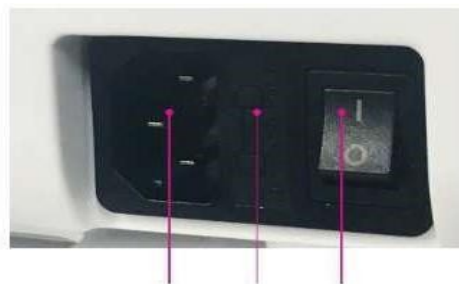

Napájecí zásuvka Pojistkový spínač

POZOR!

Při výměně pojistky vypněte napájení a odpojte zástrčku, abyste zabránili úrazu elektrickým proudem.

Dlouhodobě používaný přístroj (déle než jeden rok) by měl být servisován odborníky. Přístroj by měl být umístěn na větraném a suchém místě a v době, kdy se nepoužívá, by měl být chráněn před prachem a vnějšími vlivy.

Problémy a nápravná opatření

Pokud spotřebič nefunguje správně, obraťte se na servis. Než se obrátíte na servis, zkontrolujte přístroj pomocí následujících rad a zjistěte, zda si s problémem poradíte sami.

Problém	Příčina	Metody řešení
Po spuštění zařízení nefunguje.	Vypínač napájení 0/I je vypnutý. Přerušeno napájení pojistky. Vypínač napájení je vadný.	Zkontrolujte, zda je zástrčka zapnutá. Zapněte tlačítko 0/I. Vyměňte pojistku.

Hlava nefunguje správně.	Nelze stisknout tlačítko Start. Nesprávná instalace hlavy. Hlava byla poškozena. Nesprávná instalace kabelu se zařízením.	Stiskněte tlačítko Start. Zkontrolujte správnost instalace hlavy. Vyměňte stránky hlava nebo silikon těsnění. Znovu namontujte hlavu.
Únik kapaliny	Silikonové těsnění je poškozené nebo chybí. Nesprávná montáž zařízení.	Lahve správně uzavřete nebo vyměňte těsnění. Vraťte přístroj do servisního střediska k opravě.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

1. Přístroj je profesionální zařízení pro použití v kosmetických ordinacích. Obsluha přístroje pouze kvalifikovaným kosmetickým personálem zabraňuje nežádoucím účinkům během ošetření.
2. Přístroj se nesmí rozebírat ani se pokoušet používat k jiným účelům, než je uvedeno v této příručce. Veškerý servis a opravy smí provádět pouze autorizovaný servisní technik (společnost ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Přístroj neinstalujte ani nepoužívejte v blízkosti kapalin, na mokřích místech nebo s mokřima rukama - aby se do přístroje nedostaly žádné kapaliny.
4. V následujících případech okamžitě vytáhněte zástrčku ze zásuvky a kontaktujte autorizovaný servis společnosti ACTIVESHOP Ltd:
 - a) do spotřebiče vnikla kapalina, b) spotřebič vydává zvláštní zápach, kouř nebo vydává zvláštní zvuky, c) došlo k poškození napájecího kabelu, d) spotřebič byl převrácen nebo byl poškozen jeho kryt.
5. Na kabely nepokládejte žádné předměty. Neinstalujte jednotku na místa, kde by někdo mohl šlápnout na napájecí kabel.
6. Z bezpečnostních důvodů odpojte napájecí kabel ze zásuvky vždy, když s přístrojem skončíte.
7. Do otvoru spotřebiče nic nevkládejte. Pokud se do otvoru dostane cizí předmět, vyjměte kabel ze zásuvky a kontaktujte distributora nebo výrobce.
8. Přístroj nestavte na nestabilní vozík, polici nebo vozidlo. Při pádu může dojít k poškození přístroje.
9. Aby byla zaručena pevná životnost zařízení, doporučuje se před dalším stisknutím tlačítka napájení (mezi zapnutím a vypnutím a naopak) dodržet interval jedné minuty.
10. Napájecí zdroj musí odpovídat specifikacím uvedeným na typovém štítku. V opačném případě hrozí nebezpečí poruchy, poškození nebo dokonce vyhoření spotřebiče.

POZNÁMKY:

1. V případě poškození napájecího kabelu nebo jiných poruch se obraťte na autorizované servisní středisko - předejdete tak nebezpečí.
2. Toto zařízení mohou používat děti ve věku nejméně 8 let a osoby se sníženými fyzickými a duševními schopnostmi a s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi zařízení, pokud je zajištěn dohled nebo instruktáž, jak zařízení bezpečně používat, aby byla pochopena související rizika.
3. Spotřebič není určen k tomu, aby si s ním hrály děti. Nedovolte dětem, aby si se spotřebičem hrály.

4. Nenechávejte spotřebič bez dozoru, pokud se v jeho blízkosti nacházejí děti nebo osoby bez dostatečných znalostí o používání spotřebiče.
5. Tento elektrický spotřebič není hračka. Nesprávné použití nebo kontakt s elektrickým spotřebičem může ohrozit zdraví nebo vést k úmrtí, proto by měl být spotřebič používán a skladován mimo dosah dětí.

LIKVIDACE SPOTŘEBIČE



Použité elektrické spotřebiče, příslušenství a obaly odevzdejte do recyklačních středisek v souladu s předpisy na ochranu životního prostředí. Elektrické spotřebiče by neměly být vyhazovány do popelnice na domovní odpad. Dodržujte pravidla pro likvidaci tohoto typu zařízení. V zájmu ochrany životního prostředí v souladu se směrnicí 2012/19/ES o odpadních elektrických a

Elektronický odpad by se měl sbírat odděleně a odvážet do sběrných míst pro elektronický a elektrický odpad.

Vyřazené a staré spotřebiče obsahují plně recyklovatelné součásti, a proto by měly být odevzdány k recyklaci. Proto by měly být odevzdávány na příslušných sběrných místech a lze je také odevzdat společnosti ACTIVSHOP s.r.o.

SKLADOVÁNÍ A PŘEPRAVA

Přístroj by měl být přepravován při teplotě od (-) 10 °C do (+) 40 °C pouze v původním obalu. Přístroj by měl být skladován v dobře větraném prostoru s relativní vlhkostí nejvýše 75 %. Provozní teplota od (+) 10 °C do (+) 40 °C

°C. Během skladování a přepravy nesmí být jednotka hozena nebo upuštěna, nesmí být vystavena mechanickým nárazům nebo atmosférickým vlivům.