


Vážený zákazníku, děkujeme za zakoupení tohoto produktu.
Přečtěte si prosím pečlivě tento uživatelský manuál a řiďte se
správnými pokyny.

PROFESIONÁLNÍ ODSTRAŇOVAČ PIGMENTOVÝCH SKVRN



PROFESSIONAL DARK
SPOT REMOVER

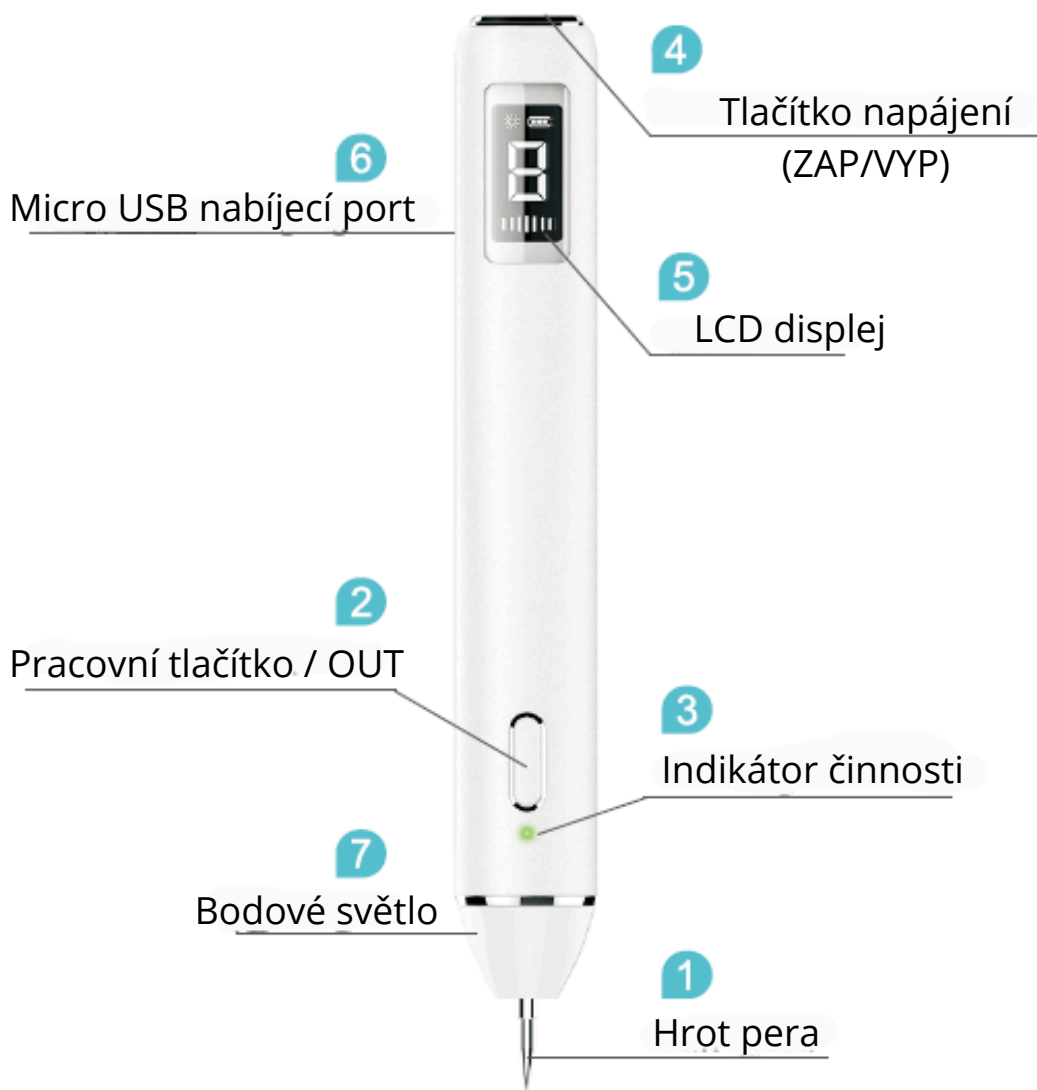

Package Contents

- 1× Odstraňovač kožních výrůstků
- 10× Tenké jehly
- 1× USB kabel
- 1× Uživatelský manuál
- 3× Silnější jehly (včetně dodatečného krytu na jehlu)

Specifications

Materiál	ABS + ocelová jehla		5V/1A
Kapacita baterie	800mAh 3.7V	Výstupní proud	MAX5W
Velikost produktu	182* 26* 26mm	Hmotnost produktu	75g
Velikost balení	200* 96* 36mm	Hmotnost balení	200g

Features

Výroba podle 6. generace německé technologie

Řízení mikroprocesorem a ochrana proti hlubokému vybití


– bezpečné použití

10 nastavitelných úrovní pro různé potřeby

LCD obrazovka zobrazuje úroveň a stav baterie


LED světlo usnadňuje práci ve tmavém prostředí

10 vyměnitelných tenkých jehel a 3 silnější jehly – odolné a trvanlivé
Ikona baterie bliká při nízkém stavu nabití

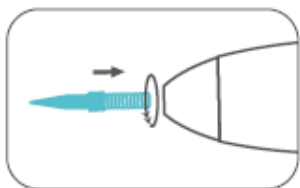

1

Zašroubuj silnější jehlu přímo do hrotu pera.

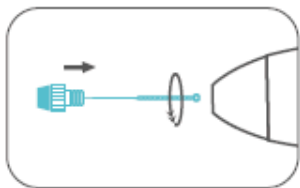

2

Zasuň tenkou jehlu nejprve do krytu jehly, a poté celý kryt našroubuj do hrotu pera.

Application Methods

Nasazení jehly:

Dezinfikuj jehlu a pokožku alkoholem.

Silnější jehlu zašroubuj přímo do hrotu pera po směru hodinových ručiček.

Tenkou jehlu nejprve vlož do krytu jehly a celý kryt pak našroubuj do hrotu pera po směru hodinových ručiček.

Zapnutí / vypnutí:

Stiskni tlačítko napájení na 2 sekundy pro zapnutí / vypnutí.

LCD displej ukazuje stav baterie a aktuální úroveň.

Pokud nebude zařízení po dobu 10 minut používáno, automaticky se vypne.

Nastavení úrovně:

Stiskni tlačítko napájení na 1 sekundu pro výběr úrovně od 1 do 10.

Pevně drž pero a při stisknutí tlačítka OUT se rozsvítí zelené světlo.

Jemně pohybu jehlou tam a zpět po místě ošetření. Jehla nesmí zůstat na jednom místě příliš dlouho.

Pokud zařízení pracuje déle než 2 minuty bez přerušení, automaticky přejde do režimu spánku.

LED světlo:

Když je pero zapnuté, rychlým dvojitým kliknutím na tlačítko napájení se rozsvítí bodové LED světlo.

Znovu dvojklikem ho můžeš vypnout.

Charging Methods

Použij adaptér 5V/1A (připravený uživatelem) k připojení USB kabelu a zařízení. Zelený indikátor začne blikat.

Zelené světlo signalizuje plné nabití (přibližně po 2 hodinách).

Nepoužívej zařízení během nabíjení.

Přebíjení nebo používání zařízení s úplně vybitou baterií může zkrátit životnost baterie.

Level Application (for reference only)

Úroveň	Typ jehly	Vhodné pro
1-2	Tenká	Tukové kuličky
3-4	Tenká	Malá znaménka
	Silná	Malé skvrny
5-6	Tenká	Malá a střední znaménka
	Silná	Malé a střední pigmentové skvrny
7-8	Tenká	Znaménka o velikosti fazole mung
	Silná	Pigmentové skvrny a plaky velikosti mung
9-10	Tenká	Velká znaménka Velké pigmentové skvrny, plaky apod.

⚠ Upozornění:

Uživatelé musí začít na úrovni 1 a postupně přecházet na vyšší úrovně podle výsledků.

Bezpečnostní pokyny

1. Než použijete zařízení na své pokožce, nejprve trénujte na zvířecí kůži, dokud nebudete ovládat přístroj s jistotou.
2. Zvaž použití částečné anestezie před zákrokem – podle své tolerance bolesti a doporučení ošetřujícího. Během použití je normální vnímat určitý zápch.
3. Neočišťuj ošetřované místo silně alkalickými prostředky. Postačí jednoduché mýdlo a voda. Vyhybej se pikantním jídlům a dbej na zdravý životní styl během hojení (1–3 měsíce).
4. Nevyšetřuj příliš velkou oblast najednou (větší než 2–3 cm). Velké zásahy zvyšují riziko infekce a krvácení. Je lepší rozdělit ošetření do 4–5 sezení.
5. Pokud po čase začne oblast svěd je to normální. Nestrhávej strup – sám odpadne přibližně za 20–30 dní.
6. Během zákroku je lepší nosit rukavice.
7. Jehlu po použití okamžitě vyjmi, vyčisti a uchovávej na suchém a čistém místě.
8. Neponořuj zařízení do vody.
9. Nepoužívej zařízení během nabíjení. Nabíjej každé 3 měsíce, i když se zařízení nepoužívá – prodloužíš tím životnost baterie.
10. Uchovávej zařízení mimo dosah dětí, domácích mazlíčků a nepovolaných osob.
11. Starší lidé, děti, těhotné ženy, lidé s onemocněním srdce nebo sklonem k tvorbě jizev musí být při použití velmi opatrní. Při jakýchkoli pochybnostech se poraď s odborníkem.

Odstraňování pigmentových skvrn:

Je vidět, že povrch s melaninovými skvrnami po kontaktu s přístrojem mírně zčerná. Pohybujte přístrojem lehce tam a zpět. Poté místo otřete vatovým tamponem.

Pokud je skvrna světlá a malá, stačí jedno ošetření.

Přesný počet pohybů tam a zpět závisí na velikosti skvrn.

Během zákroku by měl klient zůstat v klidu a operátor by měl pevně držet pero, aby nedošlo k popálení nebo vzniku jizvy.

Odstraňování znamének:

Je velmi důležité určit velikost a hloubku znaménka, než ho odstraníte. Některá se nacházejí na povrchu kůže, jiná zasahují až do podkožní tkáně.

Doporučuje se znaménka odstraňovat po malých částech, ne celý povrch najednou.

Kromě prevence zánětu je vhodné (dle doporučení lékaře) aplikovat léčiva nebo výživový krém, který podporuje obnovu buněk, a to 2–3 dny před zákrokem, aby se předešlo podráždění kůže během hojení.

Odstraňování výrůstků (granulací):

Lehce se dotkněte kořene výrůstku přístrojem a spalte jeho základ. Výrůstek odpadne sám během týdne.

Odstraňování hlubších výrůstků lze rozdělit do několika sezení.

Kromě prevence zánětu je opět vhodné (dle doporučení lékaře) aplikovat léčiva nebo krém podporující růst buněk 2–3 dny před zákrokem, aby se předešlo podráždění kůže během hojení.

Odstraňování kožních výrůstků:

Lehce se dotkněte kořene výrůstku přístrojem, aby došlo k jeho „spálení“ laserem.

Výrůstek následně sám odpadne přibližně do týdne.

Hlubší výrůstky může být potřeba odstraňovat ve více sezeních.

Pro snížení rizika podráždění pokožky a zánětu je vhodné – dle doporučení lékaře – aplikovat předem výživový krém nebo léčiva podporující obnovu buněk, ideálně 2–3 dny před zákrokem.

Odstraňování tetování:

Pro tetování je vhodnější používat silnější jehly, protože se obvykle jedná o větší plochy.

Kromě toho, že odstranění tetování trvá déle, je samotná metoda podobná jako při odstraňování pigmentových skvrn.

Tetování větší než 3 cm by mělo být odstraňováno postupně, ve více krocích. Nepoužívejte v blízkosti očí.

Nikdy se nepokoušej odstranit celé tetování najednou, protože hrozí bakteriální infekce a vážné komplikace. Uživatel by měl být maximálně opatrný.

V případě silného zánětu ihned vyhledejte lékařskou pomoc.