

ACTIVESHOP[®]

Návod k obsluze

Parafinér
model D392ET



Importer:

ACTIV Tomasz Pacholczyk
ul. Graniczna 8b, bud. DC 1
54-610 Wrocław, Polska
www.activeshop.com.pl
Rev. A/07/2020



Technická data:

| | |
|----------------------------|------------------------|
| Jmenovité napětí | 220-240V |
| Elektrický výkon | 285W |
| Jmenovitá frekvence | 50/60 Hz |
| Rozměry balení | 39 x 28 x 18 cm |
| Objem mísy | 3500 ml |

Obsah balení:

- 1x Parafínový stroj 285W
- 1x Ošetřující kartáč
- 1x Mřížka

Parafínová terapie je :

Léčebná procedura používaná ve fyzikální terapii, která spočívá v lokálních koupelích, zábalech nebo obkladech z vhodně zahřátého parafínu. Parafín má pečující, revitalizační a zklidňující účinky na suchou a popraskanou pokožku.

Druhy parafínu:

Citron – parafín s citrusovou vůní, univerzální.

Kartie – parafín s velmi jemnou svěží vůní, uklidňující - ideální pro citlivou pokožku

.Máta – parafín se svěží mátovou vůní, osvěžující.

Čokoláda – parafín s čokoládovou vůní, uvolňující.

Indikace k parafínové terapii :

Kůže:

- Suchá
- Popraskaná
- vrásčitá
- nafouklá
- nedostatek zářivosti

Kontraindikace :

- Virové infekce
- Plísňové infekce
- Bakteriální infekce
- Pustulózní a hnisavé akné
- Akné rosacea
- Narušení kontinuity kůže
- Operace obličejů (doporučuje se alespoň dvouměsíční přestávka)
- Nepoužívejte parafín na oční víčka

Uživatelský manuál :

1. Připojte zařízení ke zdroji napájení
2. Umístěte plastovou mřížku (součástí balení) na dno misky
3. Do misky dejte přiměřené množství parafínu
4. Zapněte zařízení otočením knoflíku ve směru hodinových ručiček
5. Pokud je zařízení zapnuté, na displeji se zobrazí teplota
6. Parafín zahřejte na přibližně 65 °C, dokud se nerozpustí
7. Snižte výkon ohřevu pomocí knoflíku a počkejte, dokud teplota neklesne na přibližně 55 °C

Provádění ošetření:

Zapněte zařízení podle přiložené uživatelské příručky.

1. Před ošetřením parafínovou terapií důkladně omyjte část těla, která bude podrobena terapii dezinfekčním roztokem AHD 2000.
2. Ponořte část těla do parafínu na 2-3 sekundy. Opakujte tuto akci 4 až 6krát
3. Po posledním ponoření obalte tyto části těla ošetřující fólií, nebo - pokud se ošetření týká nohou či rukou - navlékněte froté nebo froté rukavice či ponožky
4. Asi po 20 minutách odstraňte fólii/ponožky/rukavice spolu s parafínem

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

- 1 Příklad je profesionální zařízení pro použití v kosmetických salonech. Obsluha přístroje pouze kvalifikovaným kosmetickým personálem zabráňuje nežádoucím účinkům při ošetření.
 2. Příklad se nesmí rozebírat ani se pokoušet používat k jiným účelům, než je uvedeno v tomto návodu k použití.
 3. Veškerý servis a opravy smí provádět pouze autorizovaný servisní technik (společnost ACTIV Tomasz Pacholczyk).
- Příklad neinstalujte ani nepoužívejte v blízkosti kapalin, na mokřích místech nebo s mokřima rukama - do přístroje by se neměly dostat žádné kapaliny.
4. V následujících případech okamžitě odpojte přístroj ze zásuvky a kontaktujte autorizovaný servis firmy ACTIV Tomasz Pacholczyk:
(a) do přístroje vnikla tekutina, (b) přístroj vydává zvláštní zápach, kouř nebo vydává zvláštní zvuky, (c) došlo k poškození napájecího kabelu, (d) přístroj byl převrácen nebo byl poškozen jeho kryt.
 5. Na kabely nepokládejte žádné předměty. Neinstalujte přístroj na místa, kde by někdo mohl šlápnout na napájecí kabel.
 6. Z bezpečnostních důvodů odpojte napájecí kabel ze zásuvky pokaždé, když ukončíte práci s přístrojem.
 7. Do otvoru přístroje nic nevkládějte. Pokud se do otvoru dostane cizí předmět, vyjměte kabel ze zásuvky a kontaktujte distributora nebo výrobce.
 8. Příklad nestavte na nestabilní vozík, polici nebo vozidlo. Při pádu může dojít k poškození přístroje.
 9. Aby byla zaručena životnost spotřebiče, doporučuje se dodržet interval jedné minuty před opětovným stisknutím tlačítka napájení (mezi zapnutím a vypnutím a naopak).
 10. Napájení musí odpovídat údajům uvedeným na výrobním štítku. V opačném případě hrozí nebezpečí poruchy, poškození nebo dokonce vyhoření spotřebiče.

POZOR:

V případě poškození napájecího kabelu nebo jiných poruch se obraťte na autorizované servisní středisko - předejdete tak nebezpečí.

- (2. Tento přístroj je určen k používání dětmi ve věku nejméně 8 let a osobami se sníženými fyzickými, smyslovými a duševními schopnostmi a s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi zařízení, pokud je nad nimi vykonáván dohled nebo jsou poučeny o používání zařízení bezpečným způsobem tak, aby pochopily související rizika.
- 3 Zařízení není určeno k tomu, aby si s ním hrály děti. Nedovolte dětem, aby si se zařízením hrály.
- 4) Nenechávejte spotřebič bez dozoru, pokud jsou přítomny děti nebo osoby, které nejsou dostatečně obeznámeny s používáním spotřebiče.
5. Tento elektrický spotřebič není hračka. Nesprávné použití nebo kontakt s elektrickým spotřebičem může představovat zdravotní riziko nebo vést k úmrtí, proto by měl být spotřebič používán a uchovávan mimo dosah dětí.
6. Při používání spotřebiče je třeba dbát na to, aby byl v bezpečí.

LIKVIDACE SPOTŘEBIČE



Použitá elektrická spotřebiče, příslušenství a obaly likvidujte v ekologických recyklačních centrech. Elektrická spotřebiče by neměly být vyhazovány do popelnice na domovní odpad. Dodržujte pravidla pro likvidaci tohoto typu zařízení. V zájmu ochrany životního prostředí v souladu se směrnicí 2012/19/ES o odpadních elektrických a elektronických zařízeních. musí být použítá elektrická a elektronická zařízení sbírána odděleně a odvážena do sběrných míst pro použítá elektronická a elektrická zařízení.

Vyřazené a staré spotřebiče obsahují plně recyklovatelné součásti, a proto by měly být předány k opětovnému zpracování. Proto by měly být odevzdány na příslušných sběrných místech a také společnosti ACTIV Tomasz Pacholczyk.

SKLADOVÁNÍ A PŘEPRAVA

Příklad by měl být přepravován při teplotách v rozmezí (-) 20 °C až (+) 50 °C pouze v původním obalu. Příklad by měl být skladován v dobře větraném prostoru s relativní vlhkostí vzduchu nejvýše 75 %. Provozní teplota (+) 10 °C až (+) 40 °C. Během skladovacích a přepravních procesů nesmí být přístroj hozen nebo upuštěn, vystaven mechanickým nárazům nebo atmosférickým vlivům.