

# ACTIVESHOP®

Sterilizátor UV-C  
Germix Model YM9001A



**Importer:**

ACTIVESHOP SP. Z O.O.  
ul. Graniczna 8b, bud. DC2A  
54-610 Wrocław, Polska  
[www.activeshop.com.pl](http://www.activeshop.com.pl)  
Rev. A/01/2023



UV sterilizátor UM-9001A je ideálním zařízením pro ničení bakterií. Díky intuitivnímu ovládní a plnému souladu se zdravotními a bezpečnostními normami je tento sterilizátor nepostradatelný v každém kadeřnickém a kosmetickém salonu i v mnoha lékařských ordinacích. Přístroj lze libovolně používat ke sterilizaci různých výrobků z kovu, plastu, dřeva a kompozitních materiálů. Přístroj je nepostradatelný v případech, kdy nástroje nelze nebo nelze sterilizovat tekutinami. Fungování přístroje je založeno na germicidním účinku UV záření. Promyšlená konstrukce přístroje poskytuje úplnou ochranu před UV zářením a činí sterilizátor zcela bezpečným pro lidi. Jediné, co musíte udělat, je vložit nástroje do přístroje a při této metodě nemusíte navíc používat žádné kapaliny, stačí mít přístroj připojený k elektrické zásuvce.



#### TECHNICKÉ ÚDAJE:

1. Příkon: 8 W
2. Napájení: 220-240 V, 50/60 Hz
3. doba sterilizace: 3: 30 - 45 min.
4. výměna zásuvek: 1: 310 x 210 x 70 mm
5. hmotnost: 3000 g
6. Délka kabelu 1,5m

#### APLIKACE:

UV sterilizátor se používá k dezinfekci nástrojů z kovu, plastu, dřeva a kompozitních materiálů (nůžky, hřebeny, pinzety atd.).

2. Dezinfekce se provádí pomocí UV paprsků, takže pomůcky nejsou vystaveny mechanickému poškození. UV sterilizace spočívá ve vystavení materiálu ultrafialovému záření.

(3) Toto záření mění strukturu nukleových kyselin, a proto má nejsilnější účinek na vegetativní formy mikroorganismů.

(4) Zařízení je ideální pro použití v kosmetických salonech, lázních, estetické medicíně a kadeřnictvích.

#### NÁVOD K POUŽITÍ:

1. umístěte přístroj na stabilní povrch, poté vložte nástroje a zavřete UV sterilizátor

#### POZNÁMKA!!!

Nástroje vložené do zásuvky sterilizátoru by měly být čisté, suché a předem dezinfikované. Nástroje by se neměly překrývat

Připojte sterilizátor k napájení. 2. Zapněte přístroj pomocí tlačítka ON/OFF. 3. Zapněte přístroj.

Přístroj začne pracovat, doba sterilizace je přibližně 30 - 45 minut. 4. Vložte sterilizátor do zásuvky.

4. Po uplynutí požadované doby sterilizátor vypněte tlačítkem zapnutí/vypnutí.

5. Otevřete sterilizátor a vyjměte předměty (není to povinné - můžete je také ponechat v nádobě).

6. nástroje jsou připraveny k použití

#### POZNÁMKA!!!

Po uplynutí doby dezinfekce vypněte přístroj tlačítkem zapnutí/vypnutí.

#### POZNÁMKA!!!

Všechny fotografie jsou náhledové. Výrobce si vyhrazuje právo na drobné změny vzhledu výrobku.



#### **DOPORUČENÍ:**

1. spotřebič není určen k tomu, aby si s ním hrály děti. Nedovolte dětem, aby si se spotřebičem hrály.
2. Nenechávejte spotřebič bez dozoru, pokud se v jeho blízkosti nacházejí děti nebo osoby bez dostatečných znalostí o používání spotřebiče.
3. Tento elektrický spotřebič není hračka. Nesprávné použití nebo kontakt s elektrickým spotřebičem může představovat zdravotní riziko, proto by měl být spotřebič používán a skladován mimo dosah dětí.
4. Víko sterilizátoru musí být po zapnutí vždy zavřené. Nesmí být otevřeno před dokončením sterilizace nebo aromaterapie.
5. Je zakázáno otevírat přístroj před ukončením procesu a zhasnutím LED kontrolky.
6. Sterilizátor udržujte v rovnoměrné vzdálenosti od zdrojů tepla, nedovolte, aby přišel do styku s vodou nebo žíravými chemikáliemi.
7. Sterilizátor v žádném případě neotvírejte během sterilizačního procesu.
8. Přístroj se nesmí používat ani skladovat v koupelně nebo jiných vlhkých prostorách.
9. Přístroj nesmí být likvidován společně s komunálním odpadem, obraťte se na firmu specializující se na likvidaci takového odpadu.
10. Sestavené součásti je třeba otevřít a co nejvíce rozebrat, aby se nástroje sterilizovaly co nejúčinněji.

#### **POZOR!**

Při používání jakéhokoli elektrického přístroje je třeba dodržovat základní bezpečnostní opatření, zejména v přítomnosti dětí.

#### **UPOZORNĚNÍ!!!**

Všechny fotografie jsou ilustrační. Výrobce si vyhrazuje právo na drobné změny vzhledu výrobku.



## BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

- 1 Příklad je profesionální zařízení pro použití v kosmetických salonech. Obsluha přístroje pouze kvalifikovaným kosmetickým personálem zabráňuje nežádoucím účinkům při ošetření.
  2. Příklad se nesmí rozebírat ani se pokoušet používat k jiným účelům, než je uvedeno v tomto návodu k použití.
  3. Veškerý servis a opravy smí provádět pouze autorizovaný servisní technik (společnost ACTIV Tomasz Pacholczyk).
- Příklad neinstalujte ani nepoužívejte v blízkosti kapalin, na mokřích místech nebo s mokřima rukama - do přístroje by se neměly dostat žádné kapaliny.
4. V následujících případech okamžitě odpojte přístroj ze zásuvky a kontaktujte autorizovaný servis firmy ACTIV Tomasz Pacholczyk:  
(a) do přístroje vnikla tekutina, (b) přístroj vydává zvláštní zápach, kouř nebo vydává zvláštní zvuky, (c) došlo k poškození napájecího kabelu, (d) přístroj byl převrácen nebo byl poškozen jeho kryt.
  5. Na kabely nepokládejte žádné předměty. Neinstalujte přístroj na místa, kde by někdo mohl šlápnout na napájecí kabel.
  6. Z bezpečnostních důvodů odpojte napájecí kabel ze zásuvky pokaždé, když ukončíte práci s přístrojem.
  7. Do otvoru přístroje nic nevkładejte. Pokud se do otvoru dostane cizí předmět, vyjměte kabel ze zásuvky a kontaktujte distributora nebo výrobce.
  8. Příklad nestavte na nestabilní vozík, polici nebo vozidlo. Při pádu může dojít k poškození přístroje.
  9. Aby byla zaručena životnost spotřebiče, doporučuje se dodržet interval jedné minuty před opětovným stisknutím tlačítka napájení (mezi zapnutím a vypnutím a naopak).
  10. Napájení musí odpovídat údajům uvedeným na výrobním štítku. V opačném případě hrozí nebezpečí poruchy, poškození nebo dokonce vyhoření spotřebiče.

### POZOR:

V případě poškození napájecího kabelu nebo jiných poruch se obraťte na autorizované servisní středisko - předejdete tak nebezpečí.

- (2. Tento přístroj je určen k používání dětmi ve věku nejméně 8 let a osobami se sníženými fyzickými, smyslovými a duševními schopnostmi a s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi zařízení, pokud je nad nimi vykonáván dohled nebo jsou poučeny o používání zařízení bezpečným způsobem tak, aby pochopily související rizika.
- 3 Zařízení není určeno k tomu, aby si s ním hrály děti. Nedovolte dětem, aby si se zařízením hrály.
- 4) Nenechávejte spotřebič bez dozoru, pokud jsou přítomny děti nebo osoby, které nejsou dostatečně obeznámeny s používáním spotřebiče.
5. Tento elektrický spotřebič není hračka. Nesprávné použití nebo kontakt s elektrickým spotřebičem může představovat zdravotní riziko nebo vést k úmrtí, proto by měl být spotřebič používán a uchovávan mimo dosah dětí.
6. Při používání spotřebiče je třeba dbát na to, aby byl v bezpečí.

### LIKVIDACE SPOTŘEBIČE



Použitá elektrická spotřebiče, příslušenství a obaly likvidujte v ekologických recyklačních centrech. Elektrická spotřebiče by neměly být vyhazovány do popelnice na domovní odpad. Dodržujte pravidla pro likvidaci tohoto typu zařízení. V zájmu ochrany životního prostředí v souladu se směrnicí 2012/19/ES o odpadních elektrických a elektronických zařízeních. musí být použítá elektrická a elektronická zařízení sbírána odděleně a odvážena do sběrných míst pro použítá elektronická a elektrická zařízení. Vyřazené a staré spotřebiče obsahují plně recyklovatelné součásti, a proto by měly být předány k opětovnému zpracování. Proto by měly být odevzdány na příslušných sběrných místech a také společnosti ACTIV Tomasz Pacholczyk.

### SKLADOVÁNÍ A PŘEPRAVA

Příklad by měl být přepravován při teplotách v rozmezí (-) 20 °C až (+) 50 °C pouze v původním obalu. Příklad by měl být skladován v dobře větraném prostoru s relativní vlhkostí vzduchu nejvýše 75 %. Provozní teplota (+) 10 °C až (+) 40 °C. Během skladovacích a přepravních procesů nesmí být přístroj hozen nebo upuštěn, vystaven mechanickým nárazům nebo atmosférickým vlivům.